

Updatebeschreibung

Mit der CEREC Connect SW 4.1 können die Softwareversionen CEREC Connect 4.0 und 4.0.1 aktualisiert werden. Die folgenden Änderungen gegenüber den Vorgängerversionen wurden vorgenommen.

ACHTUNG: Einige neue Funktionen können nur genutzt werden, wenn das Labor auch mit der neuen inLab SW 4.0 arbeitet.

- **Anlegen von Restaurationen im Ober- und Unterkiefer**
Es können Fälle mit Präparationen in beiden Kiefer angelegt, gescannt und an das Labor gesendet werden. (Labor benötigt für diese Fälle die inLab SW 4.0)
- **Auswahl von Material und Farbe in der Administrationsphase der Software**
Für jeden Fall wird das Material und die Farbe in der in der Administrationsphase ausgewählt
- **Hinzufügen von zusätzlichen Bildkatalogen**
Für jeden Fall können die Bildkataloge „BioKopie“, BioReferenz“ und „Gingivamaske“ hinzugefügt werden
- **Neue Funktion „Quadrant wechseln“ unter Erweitert hinzugefügt**
Über diese Funktion in der Phase Aufnahme kann ein einmal zwischengespeicherter Quadrant wieder aktiviert werden, um weitere Aufnahmen für diese Sequenz zu machen
- **Funktion Modell bearbeiten kann vor der bukkalen Registrierung angewendet werden**
Die Funktion „Modell bearbeiten“ steht vor der bukkalen Registrierung zur Verfügung
- **Funktionen „Ersetzen“ und „Formen“ aus „Modell bearbeiten“ entfernt**
Die Funktionen wurden aus der Funktion „Modell bearbeiten“ herausgenommen. Sie stehen dem Labor über die inlab SW 4.0 zur Verfügung.
- **Anbindung an das neue Sirona Connect Portal**
Die Software verbindet sich mit dem neuen Sirona Connect Portal sobald die digitale Abformung an das Labor gesendet werden soll.

Ausführliche Beschreibung der neuen Funktionen finden Sie im Handbuch für Anwender der Software

Die CEREC Connect SW 4.1 ist eine Vollversion und benötigt keine Installation einer Vorgängerversion. Sie kann mit der Softwarelizenz der CEREC Connect SW 4 betrieben werden, die auf allen Lizenz Sticks vorinstalliert ist.